



フォラケア・GD40 設定手順

1 はじめに

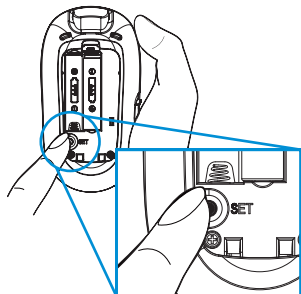


電池蓋を外して **SET** を押してください。

2 年の設定

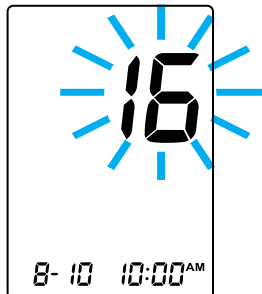

ポチッと決定! **SET** <押して合わせます>
 (M) 17 → (M) 18 → (M) 19 → (M) 20.....

3 月の設定

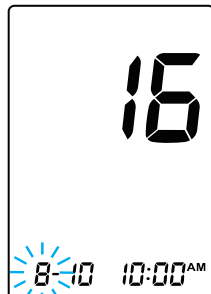


ポチッと決定! **SET** <押して合わせます>
 (M) 9 → (M) 10 → (M) 11 → (M) 12.....

4 日の設定



ポチッと決定! **SET** <押して合わせます>
 (M) 11 → (M) 12 → (M) 13 → (M) 14.....

5 時間表示の切り替え

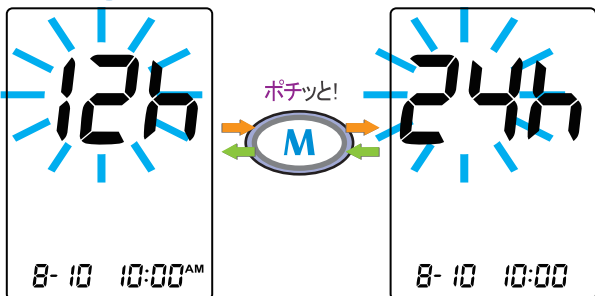


(M) を押して 12 / 24 時間表示を切り替えます。

6 時の設定



ポチッと決定! **SET** <押して合わせます>
 (M) 11 → (M) 12 → (M) 13 → (M) 14.....

7 分の設定

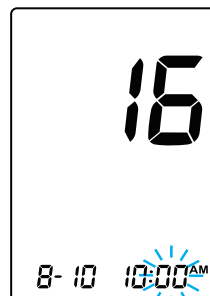

ポチッと決定! **SET** <押して合わせます>
 (M) 01 → (M) 02 → (M) 03.....

8 メモリーの消去



9 時刻アラーム

